

FiT032 用戶操作指南

1. 開機/關機

按下” OK” 鍵約 3 秒鐘，儀器將自動打開。螢幕閃爍” Please Blow” 時，請對準儀器內吹 1-2 秒鐘，以便成功檢測。

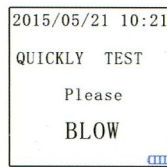



Fig 1

按下” OK” 鍵約 3 秒鐘，以手動的方式關閉機器


自動關閉: 當儀器並未按任何按鍵超過 5 分鐘，將會自動關機以節省電力

2. 檢測操作指南

2.1 主動檢測: 距離口約 2 公分，吹氣進入儀器內

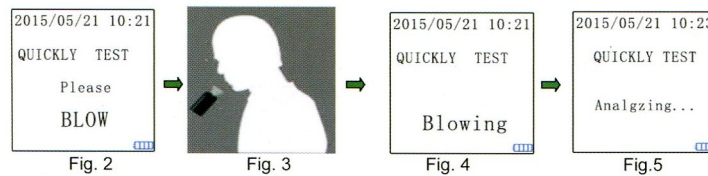

2.2 被動檢測: 當受測者對著儀器說話時，按下” OK” 鍵，儀器將自動檢測

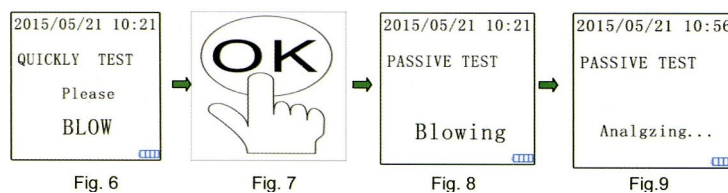

2.2 檢測結果

2.2.1 若將螢幕設定為定性模式:

- i 當檢測結果低於警示結果 (如: 0.20‰ BAC)
LCD 螢幕將會顯示” LOW” 且螢幕背景為綠色
- ii 當檢測結果高於警示結果 (如: 0.20‰ BAC)
LCD 螢幕將會顯示” HI” 且螢幕背景為紅色

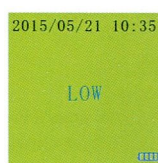


Fig. 10

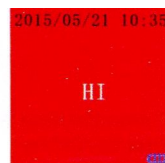


Fig. 11

2.2.2 若將螢幕設定為定量模式:

- i 當檢測結果低於警示結果 (如: 0.20‰ BAC)
LCD 螢幕將會顯示 0.000‰ BAC 且螢幕背景為綠色
- ii 當檢測結果高於警示結果 (如: 0.20‰ BAC)
LCD 螢幕將會顯示電子讀數且螢幕背景為紅色

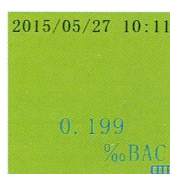


Fig. 12


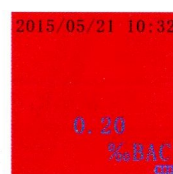


Fig. 13

2.3 重新檢測


當最後一次檢測結果顯示在螢幕上，按下” OK” 鍵，進入下一次檢測，請參閱下方圖片

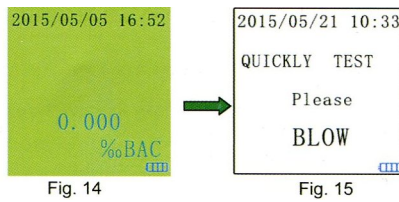

3. 系統設定

同時按下” Up” 及” Down” 鍵幾分鐘，並且進入設定選單，按下” Up” 或” Down” 鍵，選擇符合的的選單，按下” OK” 鍵確認符合的設定

3.1 選擇” RECORD” 選單並按下” OK” 鍵，進入紀錄模式，可按” Up” 和” Down” 鍵，瀏覽檢測紀錄

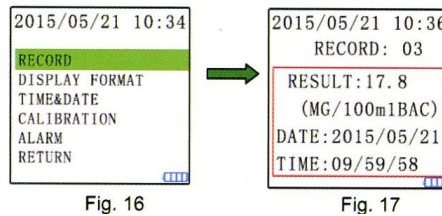

3.2 螢幕模式

選擇” DISPLAY FORMAT” 選單並且按下” OK” 鍵，進入設定模式，您可選擇” QUALITATIVE” 。按下” OK” 鍵，設定定性模式。


選擇” QUANTITATIVE” 並按下” OK” 鍵，設定定量模式。

單位: 選擇 ”mg/100ml BAC “或 ”mg/l BrAC “或 ”% BAC” 並按下” OK” 鍵確認。



3.3 時間設定

選擇” TIME&DATE” 選單並按下” Up” 和” Down” 鍵，以調整日期與時間。按下” OK” 鍵確認。請見下方圖片

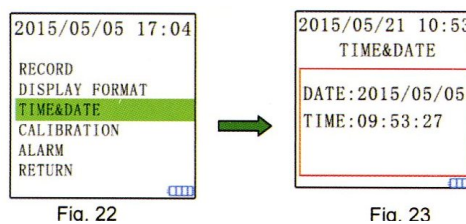

3.4 注意: ”CALIBRATION” 設定有密碼管理，只有我們授權的維修中心能做校正

3.5 警示設定

選擇” ALARM” 選單並按下” UP” 及” Down” 鍵以調整數位，按下” OK” 確認。請見下方圖片

